



Акку-Чек® Сейф-Т-Про Уно –  
одноразовий пристрій для проколювання



# Простий, зручний та безпечний



## ▶ Простий


Зняти стерильний ковпачок, притиснути пристрій до обраної ділянки і натиснути на кнопку «пуск»

## ▶ Зручний

T-подібний ергономічний дизайн забезпечує зручне утримування пристрою

## ▶ Безпечний

- спеціальний запобіжник переломлюється під час натискання на кнопку «пуск», що робить неможливим повторне використання пристрою
- ланцет автоматично втягується у корпус після проколювання
- кнопка «пуск» залишається в натиснутому положенні після використання

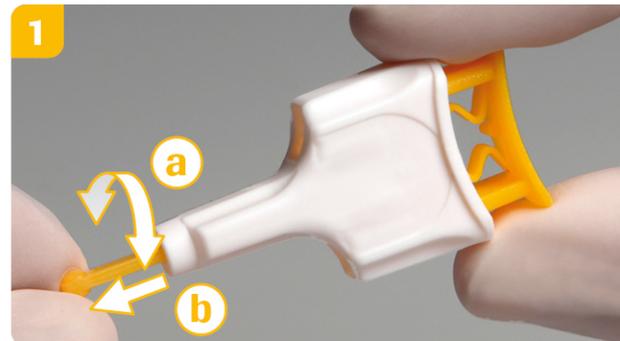

Прокрутіть стерильний ковпачок на чверть оберта вправо і вліво або навпаки (a). Видаліть стерильний ковпачок (b).




Щільно притисніть пристрій до обраної ділянки на пальці. Великим пальцем натисніть на кнопку «пуск» до упору.


Особливий зріз під оптимальним кутом і малий діаметр ланцета (Ø 0,36 мм, 28 G) забезпечують плавне і швидке проколювання.

## Отримання краплі крові

За допомогою **Акку-Чек® Сейф-Т-Про Уно** можна отримати капілярну кров:

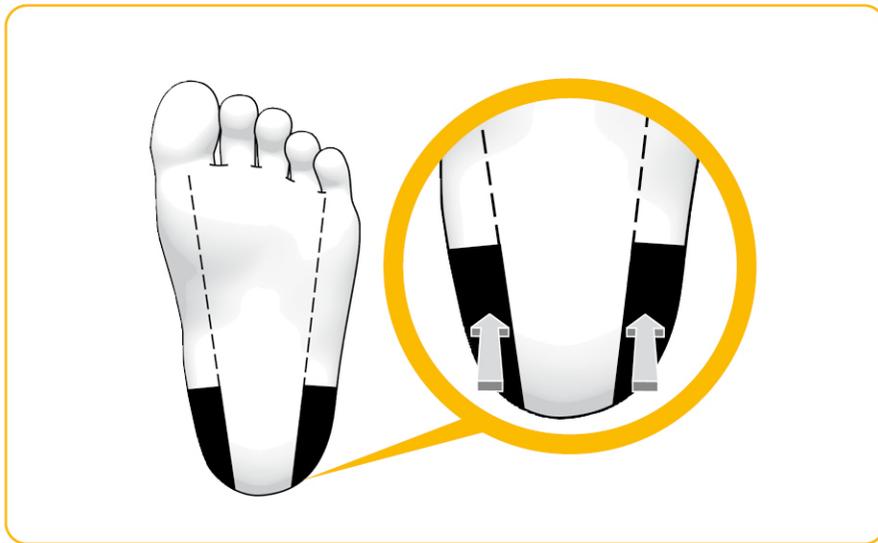

- ▶ у дітей віком до 1 року з бічних ділянок ступні (див. ділянки чорного кольору на мал.)

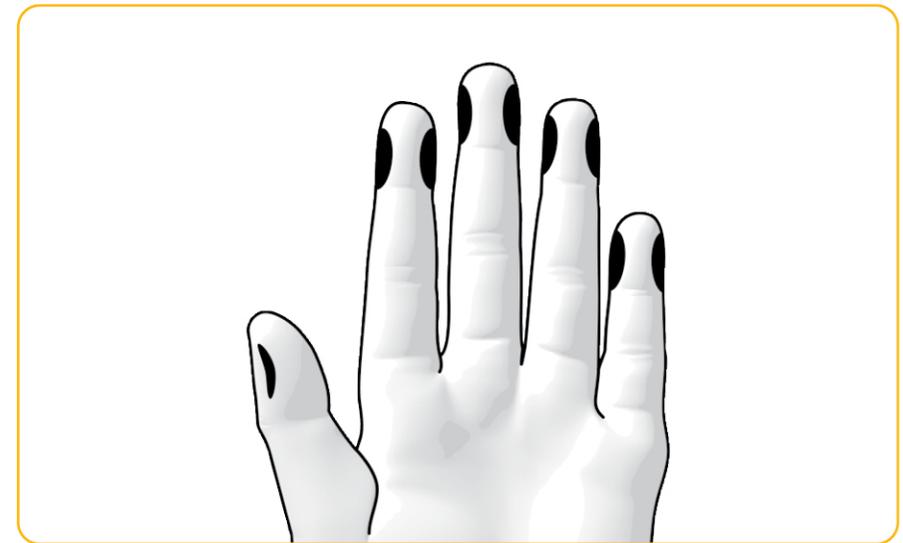

- ▶ у дітей старше одного року та дорослих з бічної сторони кінчика пальця, оскільки в цьому місці проколювання відмічаються найменші больові відчуття.



**БЕЗСТРОКОВА ГАРАНТІЯ**

**ТА**



**БЕЗКОШТОВНИЙ СЕРВІС<sup>1</sup>**



**ГАРЯЧА ЛІНІЯ<sup>2</sup>**

**0 800 300 540**



**ЧАТ-БОТ<sup>2</sup>**

**сервіс підтримки 24/7**



**НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО**

**[accu-chek.com.ua](https://accu-chek.com.ua)**



**ЗНАЙТИ В АПТЕКАХ**

**[tabletki.ua](https://tabletki.ua)**



<sup>1</sup> Крім випадків, зазначених у Керівництві Користувача.

<sup>2</sup> Обслуговується ТОВ «Діалог Діагностика».

Перед використання ознайомтеся з Керівництвом Користувача і проконсультуйтеся з лікуючим лікарем.

Інформація призначена для медичних та фармацевтичних працівників.



Roche Diabetes Care GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Germany  
[www.accu-chek.com.ua](http://www.accu-chek.com.ua)

«Рош Діабетес Кеа ТімО»,  
Зандофер Штрассе 116  
68305, Мангайм, Німеччина



Уповноважений представник в Україні:  
ТОВ «Рош Україна»,  
Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 139, 5 поверх.  
E-mail: [ukraine.accu-chek@roche.com](mailto:ukraine.accu-chek@roche.com)

Офіційний імпортер:  
ТОВ «Діалог Діагностика»,  
Україна, 04205, м. Київ, проспект Оболонський 32.  
Телефон гарячої лінії 0 800 300 540.  
E-mail: [info@dialogd.com](mailto:info@dialogd.com)