

АККУ-ЧЕК® Софтклікс

Roche



Акку-Чек® Софтклікс -
зручний пристрій для плавного
і швидкого проколювання.



Перед використання ознайомтесь з Керівництвом Користувача і проконсультуйтеся з лікуючим лікарем.
Інформація призначена для медичних та фармацевтичних працівників.

АККУ-ЧЕК®

Зручний у використанні



Легко навчитись



1
Зніміть ковпачок.



2
Встановіть ланцет в фіксатор до клацання.



3
Видаліть захисний ковпачок обертальним рухом.



4
Закрийте пристрій ковпачком.



5
Оберіть 1 з 11 рівнів глибини проколу.



6
Натисніть на кнопку «взведення».




7
Щільно притисніть пристрій до обраної ділянки на пальці і натисніть кнопку «пуск».




8
Зніміть ковпачок. Видаліть використаний ланцет за допомогою виймача.

Плавне і швидке проколювання

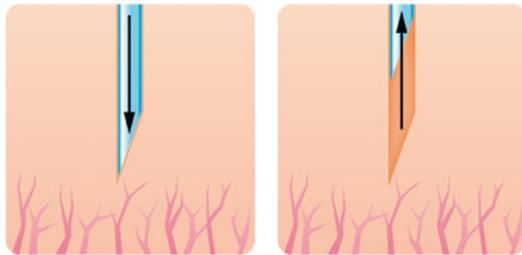

Технологія Кліксмоушин

- ▶ Швидке проколювання без вібрації
- ▶ Ланцет зупиняється плавно, з швидким поверненням назад

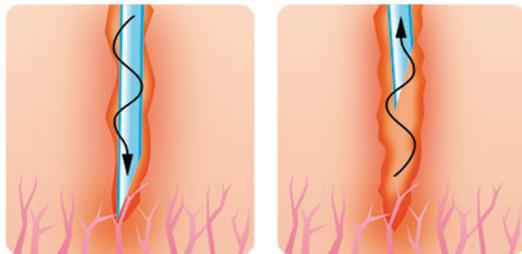

Традиційна технологія

- ▶ Вібрація призводить до болючої травматизації тканин
- ▶ Ланцет різко зупиняється і повертається вібруючи



- ▶ Особливий зріз ланцетів Акку-Чек® Софтклікс в поєднанні з технологією Кліксмоушин забезпечує плавне і швидке проколювання.

Плавне і швидке проколювання

Ланцети Акку-Чек® Софтклікс

- 3-сторонній зріз ланцета під оптимальним кутом
- Гладка полірована поверхня, призначена для зменшення тертя під час проколювання
- Прокол триває лише декілька мілісекунд



Використання пристрою Акку-Чек® Софтклікс разом з ланцетами Акку-Чек® Софтклікс робить проколювання плавним і швидким, що допомагає звести до мінімуму ушкодження шкіри і нервових тканин.

Компактний і зручний



5 порад для отримання краплі крові



Мийте і витирайте руки **насухо**.



Робіть проколювання на **бічній поверхні пальця**.



Щільно притискайте до шкіри пристрій для проколювання.



Обирайте глибину проколу, достатню для отримання краплі крові.



Щоденно змінюйте пальці і забезпечуйте **хорошу циркуляцію крові**.



АККУ-ЧЕК®

АККУ-ЧЕК® Софтклікс

Roche



БЕЗСТРОКОВА ГАРАНТІЯ

ТА



БЕЗКОШТОВНИЙ СЕРВІС¹



ГАРЯЧА ЛІНІЯ²

0 800 300 540



ЧАТ-БОТ²

сервіс підтримки 24/7



НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО

accu-chek.com.ua



ЗНАЙТИ В АПТЕКАХ

tabletki.ua

Roche Diabetes Care GmbH «Рош Діабетес Кеа ГмБХ»,
Sandhofer Strasse 116 Зандрофер Штрассе 116
68305 Mannheim, Germany 68305, Мангайм, Німеччина
www.accu-chek.com.ua

ТОВ «Рош Україна»,
Україна, 003150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 139, 5 поверх.
E-mail: ukraine.accu-chek@roche.com

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Диалог Діагностика»,
Україна, 04205, м. Київ, проспект Оболонський 32.
Телефон гарячої лінії 0 800 300 540.
E-mail: info@dialogd.com

¹ Крім випадків, зазначених у Керівництві Користувача.

² Обслуговується ТОВ «Диалог Діагностика».

Перед використання ознайомтесь з Керівництвом Користувача і проконсультуйтеся з лікуючим лікарем.
Інформація призначена для медичних та фармацевтичних працівників.

АККУ-ЧЕК®