

# Акку-Чек® Актив – глюкометр перевірений часом

Більше 20 мільйонів користувачів, більш ніж в 100 країнах світу, довіряють глюкометру Акку-Чек® Актив більше 12 років.<sup>1</sup>



БЕЗ КОДУВАННЯ



**Акку-Чек –  
ПРОСТО  
ТА  
ТОЧНО<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> З моменту представлення першої моделі Акку-Чек® Актив в 2001 році.

<sup>2</sup> Мається на увазі Простий у використанні за умов дотримання правил зазначених у Керівництві Користувача.

<sup>3</sup> Система Акку-Чек® Актив відповідає всім вимогам стандартів ISO 15197:2013 та EN ISO 15197:2015.

Перед використанням ознайомтесь з Керівництвом Користувача і проконсультуйтеся з лікуючим лікарем.

Інформація призначена для медичних та фармацевтичних працівників.

## Контрольна перевірка глюкометра Акку-Чек® Актив



**Контрольний розчин Акку-Чек® Актив складається з двох флаконів:**

- CONTROL 1 - розчин глюкози у низькій концентрації
- CONTROL 2 - розчин глюкози у високій концентрації

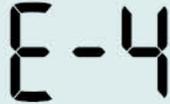
**Призначені для перевірки роботи глюкометра в наступних ситуаціях:**

- після відкриття нової упаковки з тест-смужками
- після заміни батарейки
- після очищення направляючої для тест-смужки і оптичного отвору
- при отриманні сумнівних результатів

**Результати отримані при контрольній перевірці**

**відмічаються символом .**

## Повідомлення про помилки

| Повідомлення про помилку   | Причина та рішення  | Повідомлення про помилку  | Причина та рішення  |
|--|---|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ви ввели тест-смужку невірно або не повністю.</li> <li>Ви ввели використану тест-смужку в глюкометр.</li> <li>Ви нанесли кров або контрольний розчин на тест-смужку занадто рано, тобто, до того як символ краплі почав блимати на дисплеї.</li> <li>Оптичне вікно забруднене.</li> </ul>  |    | <p>У процесі самоконтролю Ви підключили глюкометр до увімкненого комп'ютера.</p>                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ваш показник рівня глюкози у крові може бути надто низьким.</li> <li>Ви видалили тест-смужку з глюкометра для нанесення крові та не ввели її знову упродовж 20 секунд.</li> <li>Тест-смужка зігнулася або пересунулася в процесі проведення самоконтролю.</li> <li>Ви нанесли замало крові або контрольного розчину на тест-смужку.</li> <li>Ви занадто довго чекали, щоб нанести другу краплю крові чи контрольного розчину. Почніть самоконтроль рівня глюкози у крові спочатку, використовуючи нову тест-смужку.</li> </ul> |    | <p>Глюкометр зазнав впливу потужного електромагнітного поля.</p>  |
|  |   |    | <p>Глюкометр зазнав впливу великої кількості світла.</p>  |
|  |   |  | <p>Виникла помилка у функціонуванні глюкометра.</p>   |
|  |   |  | <p>Температура оточуючого середовища або температура глюкометра занизька чи висока для проведення самоконтролю.</p> |

## Система Акку-Чек® Актив



### Склад системи:

1. Глюкометр Акку-Чек Актив, №1
2. Тест-смужки Акку-Чек Актив, №10шт
3. Пристрій для проколювання Акку-Чек Софтклікс, №1
4. Ланцети Акку-Чек Софтклікс, №10
5. М'який чохол для зберігання, №1
6. Керівництво Користувача на українській мові з БЕЗСТРОКОВОЮ гарантією.



### Розхідні матеріали:

- Тест-смужки Акку-Чек® Актив №50
- Контрольний розчин Акку-Чек® Актив
- Ланцети Акку-Чек® Софтклікс №25
- Ланцети Акку-Чек® Софтклікс №200

## Показники глюкози в плазмі крові та частота самоконтролів

Нормальні показники глюкози в плазмі крові натще у дорослих, не хворих на цукровий діабет нижче 5,6 ммоль/л. Показники глюкози в плазмі крові натще у дорослих 7,0 ммоль/л і вище, підтверджені двома тестами, діагностують цукровий діабет.<sup>1,2,3</sup> Показники глюкози в плазмі крові натще у дорослих від 5,6 до 6,9 ммоль/л діагностують порушення толерантності до глюкози (преддіабет).<sup>1</sup>

|  | Предіабет         | Цукровий діабет |
|--|-------------------|-----------------|
| <b>Рівень глюкози у плазмі крові натще</b> | 5,6 - 6,9 ммоль/л | > 7,0 ммоль/л   |

### Цільові показники глікемії для не вагітних дорослих із ЦД

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Рівень глюкози в плазмі крові натще</b>                                 | 4,4-7,2 ммоль/л |
| <b>Пікове значення глюкози в плазмі капілярної крові після прийому їжі</b> | < 10,0 ммоль/л  |



### Рекомендації Міжнародної Діабетичної Федерації по частоті самоконтролів в залежності від типу діабету<sup>1</sup>

| Тип Діабету                  | 1 Тип Діабету    | 2 Тип Діабету без інсуліну | 2 Тип Діабету з інсуліном | Діабет вагітних |
|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Частота самоконтролів</b> | 3-4 рази на день | 2-3 рази на тиждень        | 2-3 рази на день          | 4 рази на день* |

\* - (через годину після кожного прийому їжі) і при пості

<sup>1</sup> Американська Діабетична Асоціація: Стандарти медичної допомоги при діабеті-2013. Diabetes Care, 36, (Suppl. 1), S11-S66, 2013.

<sup>2</sup> Методичні рекомендації Міжнародної Діабетичної Федерації. Глобальні рекомендації по діабету 2 типу. Брюссель: Міжнародна Діабетична Федерація, 2012.

<sup>3</sup> Визначення та діагностика цукрового діабету та проміжної гіперглікемії: звіт щодо консультації ВОЗ / МДФ. ВОЗ, Женева, 2006 р. (ISBN 92 4 159493 4, ISBN 978 92 4 159493 6).

Перед використанням ознайомтесь з Керівництвом Користувача і проконсультуйтеся з лікуючим лікарем.

Інформація призначена для медичних та фармацевтичних працівників.



**БЕЗСТРОКОВА ГАРАНТІЯ**

**ТА**



**БЕЗКОШТОВНИЙ СЕРВІС<sup>1</sup>**



**ГАРЯЧА ЛІНІЯ<sup>2</sup>**  
**0 800 300 540**



**ЧАТ-БОТ<sup>2</sup>**  
**сервіс підтримки 24/7**



**ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ**  
**[accu-chek.com.ua](http://accu-chek.com.ua)**



**ЗНАЙТИ В АПТЕКАХ**  
**[tabletki.ua](http://tabletki.ua)**



**БЕЗ КОДУВАННЯ**

<sup>1</sup> Крім випадків, зазначених у Керівництві Користувача.  
<sup>2</sup> Обслуговується ТОВ «Діалог Діагностика».

Перед використанням ознайомтесь з Керівництвом Користувача і проконсультуйтеся з лікуючим лікарем.  
Інформація призначена для медичних та фармацевтичних працівників.

Roche Diabetes Care GmbH «Рош Діабетес Кеа ГмбХ»,  
Sandhofer Strasse 116 Зандгофер Штрассе 116  
68305 Mannheim, Germany 68305, Мангайм,  
www.accu-chek.com.ua Німеччина

Уповноважений представник в Україні:  
ТОВ «Рош Україна»,  
Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 139, 5 поверх.  
E-mail: [ukraine.accu-chek@roche.com](mailto:ukraine.accu-chek@roche.com)

Офіційний імпортер:  
ТОВ «Діалог Діагностика»,  
Україна, 04205, м. Київ, проспект Оболонський 32.  
Телефон гарячої лінії 0 800 300 540.  
E-mail: [info@dialogd.com](mailto:info@dialogd.com)