



Акку-Чек® Сейф-Т-Про Плюс –
одноразовий пристрій для проколювання шкіри



Простий, зручний та безпечний



▶ ПРОСТИЙ

Зняти стерильний ковпачок, притиснути пристрій до обраної ділянки і натиснути на кнопку «пуск»

▶ ЗРУЧНИЙ

Ергономічний дизайн забезпечує зручне утримування пристрою в руках.

Має 3 рівні глибини проникнення ланцета.


▶ БЕЗПЕЧНИЙ

- спеціальний запобіжник переломлюється під час натискання на кнопку «пуск», що робить неможливим повторне використання пристрою
- ланцет автоматично втягується у корпус після проколювання
- кнопка «пуск» залишається в натиснутому положенні після використання



1 Прокручування

Круговим рухом зніміть стерильний ковпачок.

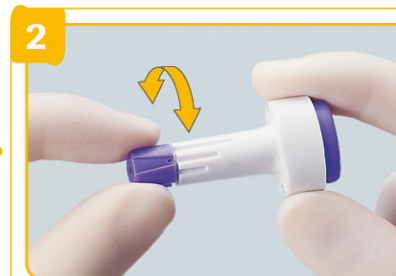

2 Налаштування глибини проколювання

Встановіть регулятор на бажану глибину проникнення ланцета.




3 Одержання зразка


- Тримайте пристрій для проколювання між вказівним, середнім і великим пальцями.
- Щільно притискайте пристрій до обраної ділянки.
- За допомогою великого пальця натисніть на кнопку «пуск».

Отримання краплі крові

За допомогою **Акку-Чек® Сейф-Т-Про-Плюс** можна отримати капілярну кров:

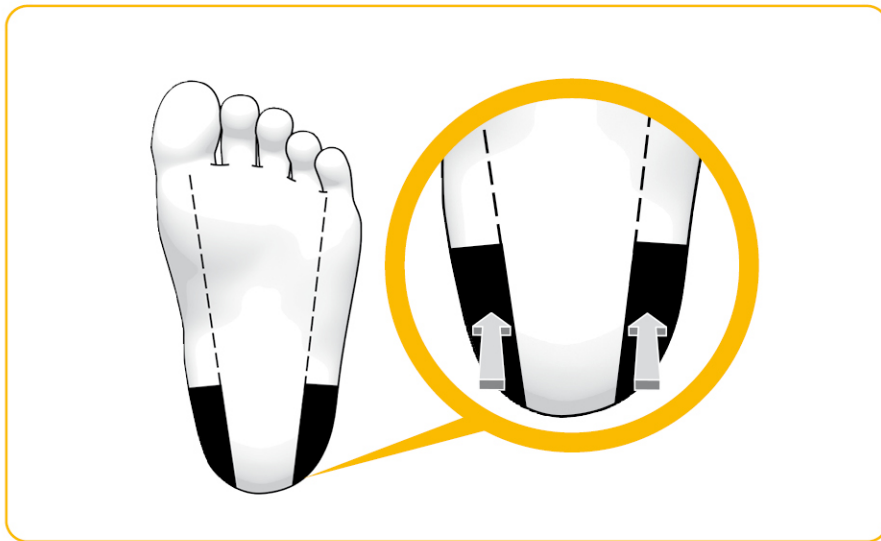

- ▶ у дітей віком до 1 року з бічних ділянок ступні (див. ділянки чорного кольору на мал.)

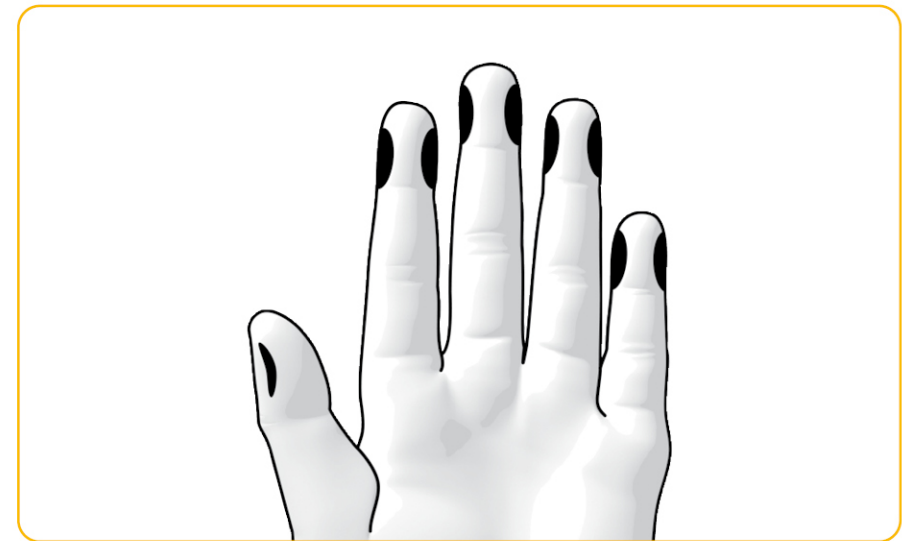

- ▶ у дітей старше одного року та дорослих з бічної сторони кінчика пальця, оскільки в цьому місці проколювання відмічаються найменші больові відчуття.

АККУ-ЧЕК® Сейф-Т-Про Плюс

Roche



БЕЗСТРОКОВА ГАРАНТІЯ

ТА



БЕЗКОШТОВНИЙ СЕРВІС¹



ГАРЯЧА ЛІНІЯ²

0 800 300 540



ЧАТ-БОТ²

сервіс підтримки 24/7



НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО

accu-chek.com.ua



ЗНАЙТИ В АПТЕКАХ

tabletki.ua



¹ Крім випадків, зазначених у Керівництві Користувача.

² Обслуговується ТОВ «Діалог Діагностика».

Перед використанням ознайомтеся з Керівництвом Користувача і проконсультуйтеся з лікуючим лікарем.
Інформація призначена для медичних та фармацевтичних працівників.



Roche Diabetes Care GmbH «Рош Діабетес Кеа ГмбХ»,
Sandhofer Strasse 116 Зандоффер Штрассе 116
68305 Mannheim, Germany 68305, Мангайм, Німеччина
www.accu-chek.com.ua



Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Рош Україна»,
Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 139, 5 поверх.
E-mail: ukraine.accu-chek@roche.com

Офіційний імпортер:

ТОВ «Діалог Діагностика»,
Україна, 04205, м. Київ, проспект Оболонський 32.

Телефон гарячої лінії 0 800 300 540.

E-mail: info@dialogd.com

АККУ-ЧЕК®